

Handleiding voor aanpassingen voor HandiCalendar

Een handleiding voor de belangrijkste aanpassingen en instelling in HandiCalendar voor Android.




HandiCalendar




Instellingen voor meldingen

Hoe moeten alarmmeldingen van HandiCalendar worden weergegeven?

Volledig scherm
Melding

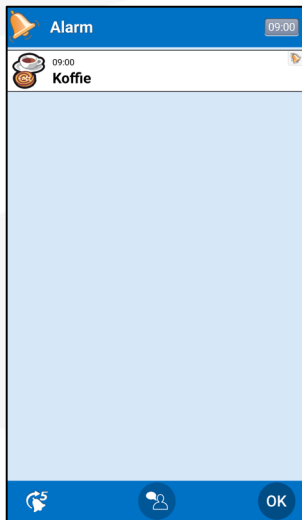

*Volledig scherm
(huidige
instelling)*

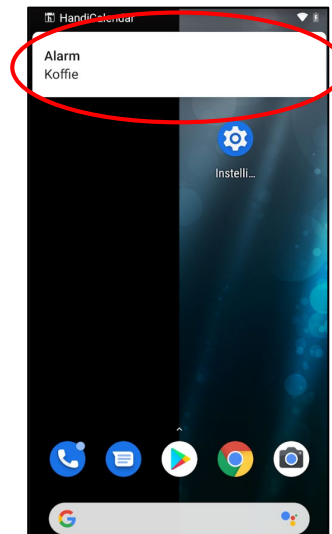

Melding

*(Als het scherm is
ingeschakeld en
HandiCalendar actief is,
wordt de alarmweergave
direct weergegeven)*

Selecteer dit bij **Instellingen|Alarmweergave**.

Ondersteuning van afbeeldingen: myAbilia




Heeft de gebruiker ondersteuning van afbeeldingen nodig?

Ja
Nee

Zo ja, welke afbeeldingenbibliotheek?

Basisafbeeldingen	<input type="checkbox"/>
Badkamer	<input type="checkbox"/>
Kleren	<input type="checkbox"/>
Handi	<input type="checkbox"/>
School	<input type="checkbox"/>
Smileys	<input type="checkbox"/>
Overig	<input type="checkbox"/>

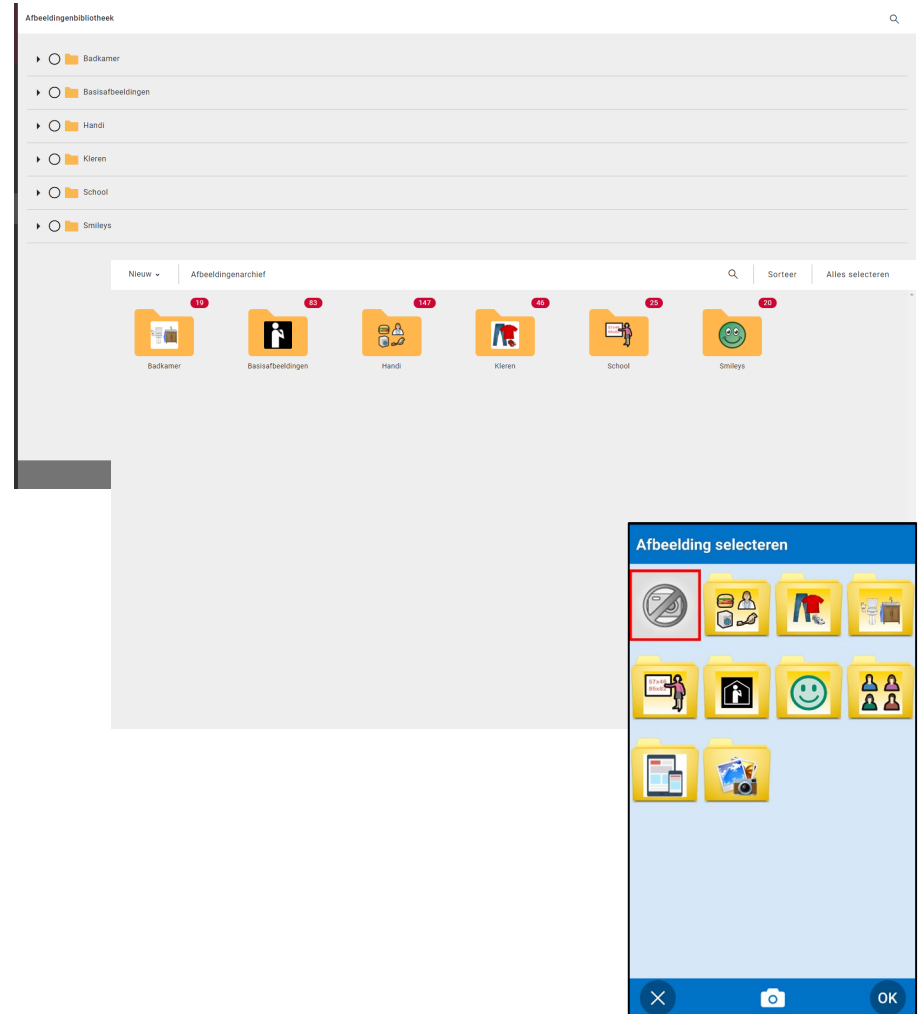

Gebruik myAbilia om het afbeeldingenarchief aan te passen voor de Handi.

Spraakondersteuning

Moet spraakondersteuning (synthese) worden gebruikt?

Ja
Nee



1. Druk op de knop voor *spraakondersteuning* om deze te markeren.
2. Druk ergens op om een beschrijving ervan te horen.



ABILIA

Kalenderweergave: bladeren

Moet de gebruiker terug kunnen bladeren op de dag?


Ja
Nee

Moet de gebruiker vooruit kunnen bladeren vanaf de huidige dag?

Niet toegestaan
Ja, maximaal 6 dagen
Ja, onbeperkt

Moet de gebruiker terug kunnen bladeren naar de afgelopen dagen?

Ja
Nee

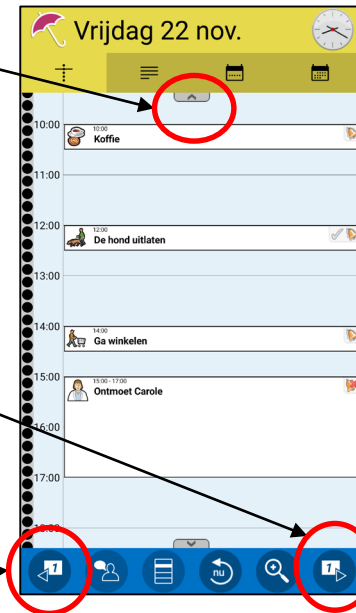

Kalenderweergave: activiteiten

Moet het tijdstip van de activiteit digitaal worden weergegeven?

Ja	<input type="checkbox"/>	 13:00 Koffie
Nee	<input type="checkbox"/>	 Koffie


Moet de tekst van de activiteit worden weergegeven?

Ja	<input type="checkbox"/>	 Koffie
Nee	<input type="checkbox"/>	

Activiteitsweergave

Moet de gebruiker een activiteit kunnen verwijderen?

Ja
Nee

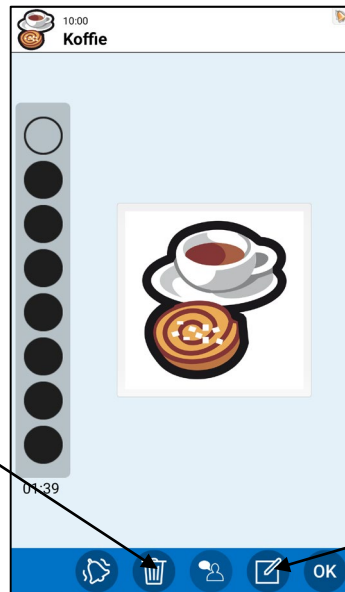

Moet de gebruiker een activiteit kunnen bewerken?

Ja
Nee




← Laatste kwartier als 5
← stippen
Digitaal aftellen

Activiteit toevoegen: standaardalarm

Wat voor alarm moet standaard worden geselecteerd?

- Alarm (audiosignaal)
- Stil alarm (stil)
- Geen alarm (helemaal geen melding)

Het alarmtype kan vervolgens per activiteit worden ingesteld.

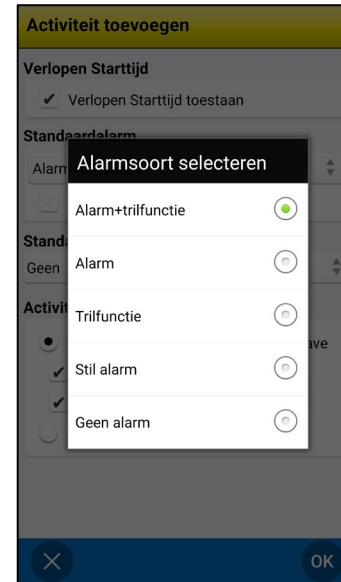

Activiteit toevoegen


Moet de gebruiker activiteiten kunnen toevoegen aan een begintijd die is verstreken?

Ja
Nee

Moet de gebruiker activiteiten toevoegen via de bewerkweergave of via de stappen van wizard?

Via de bewerkweergave
Via de stappen van de wizard

Bewerkweergave

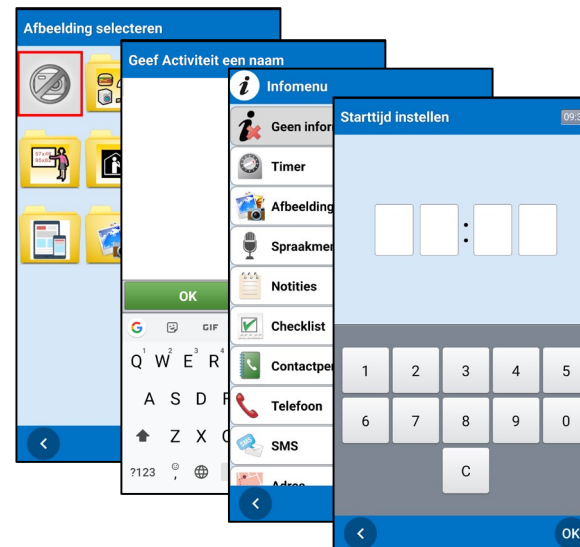

Stap voor stap



Selecteer dit bij **Instellingen|Activiteit toevoegen**.

Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave



Welke vensters zijn beschikbaar als de bewerkweergave wordt gebruikt?

Moet de gebruiker het type activiteit kunnen selecteren?

Ja
Nee

Moet de gebruiker een standaardactiviteit kunnen selecteren?


Ja
Nee

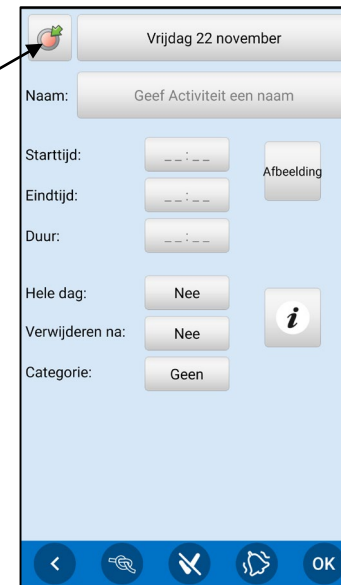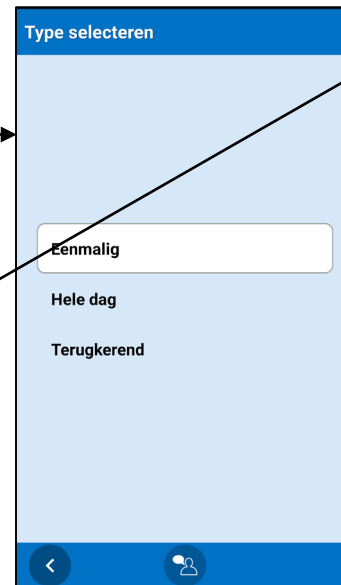

Een activiteit stap voor stap toevoegen

Welke vensters zijn beschikbaar als de wizard wordt gebruikt?

- Datum selecteren
- Type activiteit selecteren
- Standaardactiviteit selecteren
- Foto selecteren
- Geef activiteit een naam
- Informatie selecteren
- Verwijderen na
- Afvinkbaar en Alarm selecteren
- Herinneringen invoeren
- Categorie selecteren
- Eindtijd instellen

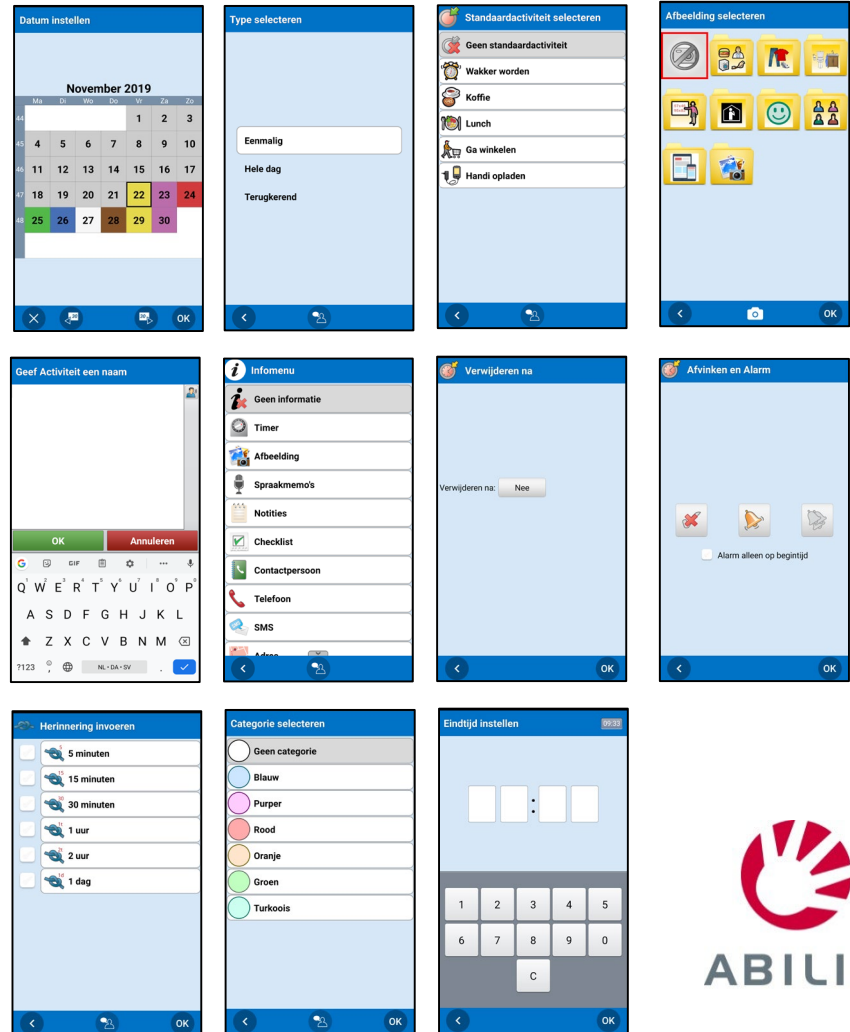

Selecteer dit bij **Instellingen|Activiteit toevoegen**.



Bewerkweergave

Welke functies moet de bewerkweergave bevatten?

Datum	<input type="text"/>
Eindtijd	<input type="text"/>
Hele dag	<input type="text"/>
Afvinkbaarheid	<input type="text"/>
Verwijderen na	<input type="text"/>
Categorie	<input type="text"/>

Vrijdag 22 november

Naam: Koffie

Starttijd: 09:00

Eindtijd: --:--

Duur: --:--

Hele dag: Nee

Verwijderen na: Ja

Categorie: Geen

Info icon (i)

Navigation icons: X, Back, Delete, Edit, OK

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>



Info
Herinnering
Alarmtype

Een functie koppelen aan een activiteit

- Lees informatie wanneer nodig
- Niet nodig om te zoeken

Welke functies moeten worden weergegeven in het Infomenu en kunnen worden gekoppeld aan een activiteit?

Timer	<input type="checkbox"/>
Afbeelding	<input type="checkbox"/>
Spraakmemo	<input type="checkbox"/>
Notities	<input type="checkbox"/>
Checklist	<input type="checkbox"/>
Contactpersoon	<input type="checkbox"/>
Telefoon	<input type="checkbox"/>
SMS	<input type="checkbox"/>
Adres	<input type="checkbox"/>
Link	<input type="checkbox"/>

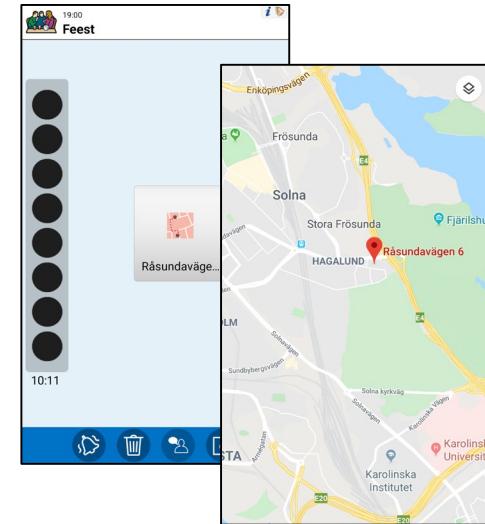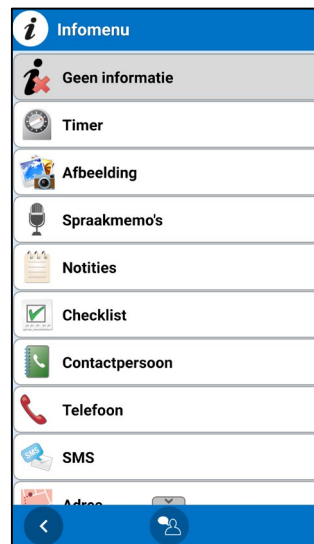

Voorbeeld van een gekoppeld adres

Functies in het menu Kalender

Moet de gebruiker nieuwe activiteiten kunnen toevoegen?

Ja
Nee

Moet de gebruiker een timer kunnen gebruiken?


Ja
Nee

Moet de gebruiker kunnen zoeken naar activiteiten?

Ja
Nee

Moet de gebruiker standaardactiviteiten en standaardtimers kunnen beheren?


Ja
Nee

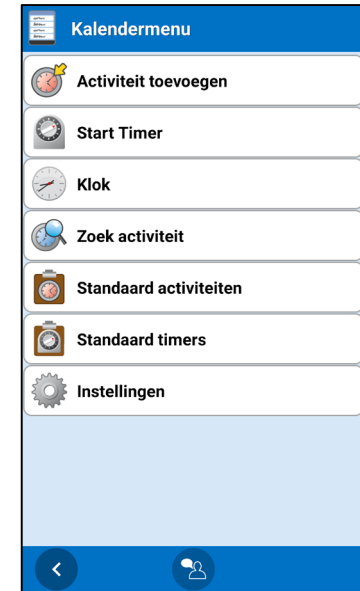

Kalenderweergave: tijdweergave

Moet het datumveld van de agenda een analoge klok of een knop Nieuwe activiteit tonen?

Analoge klok
Knop Activiteit toevoegen

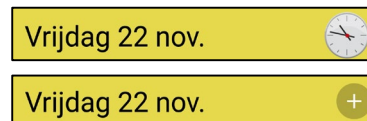

Moet een maand worden gemarkeerd met een symbool of een weeknummer?

Maandsymbool
Maandpictogram
Weeknummer
Geen



*Groen: maandag
Blauw: dinsdag
Wit: woensdag
Bruin: donderdag
Geel: vrijdag
Roze: zaterdag
Rood: zondag*

Moeten de dagen weekdagkleuren hebben?




Weekdagkleuren
Geen weekdagkleuren



Klokweergave

Moet het scherm een analoge of digitale klok hebben?

Analoog	<input type="checkbox"/>
Digitaal	<input type="checkbox"/>
Analoog en digitaal	<input type="checkbox"/>

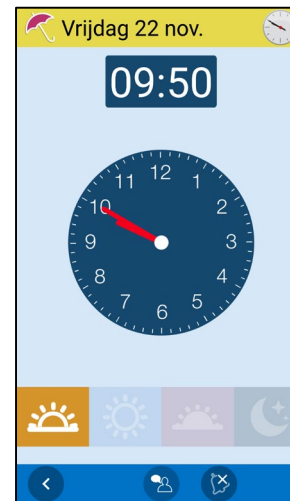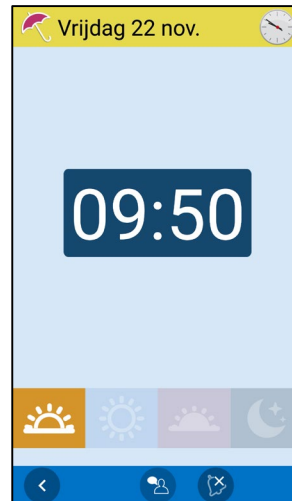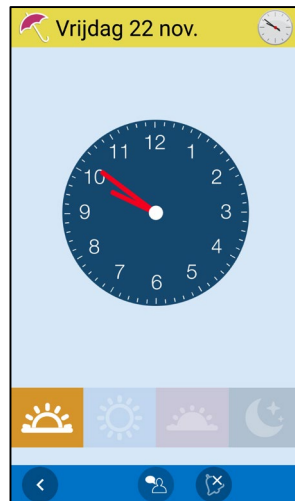

Weekweergave

Moeten terugkerende activiteiten worden weergegeven?


Ja
Nee

Hoeveel dagen moeten worden weergegeven in de weekweergave?

5
7

Hoe moeten activiteiten worden weergegeven?

Altijd tijd
Foto

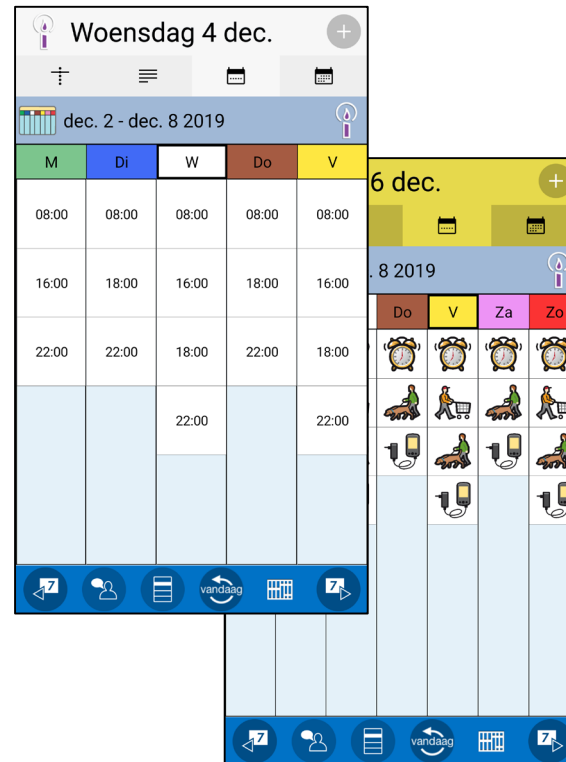

Start timer

Moet de gebruiker standaardtimers kunnen selecteren?


Ja
Nee

Moet de gebruiker een afbeelding kunnen selecteren voor de nieuwe timer?

Ja
Nee

Moet de gebruiker tekst kunnen toevoegen aan een nieuwe timer?

Ja
Nee

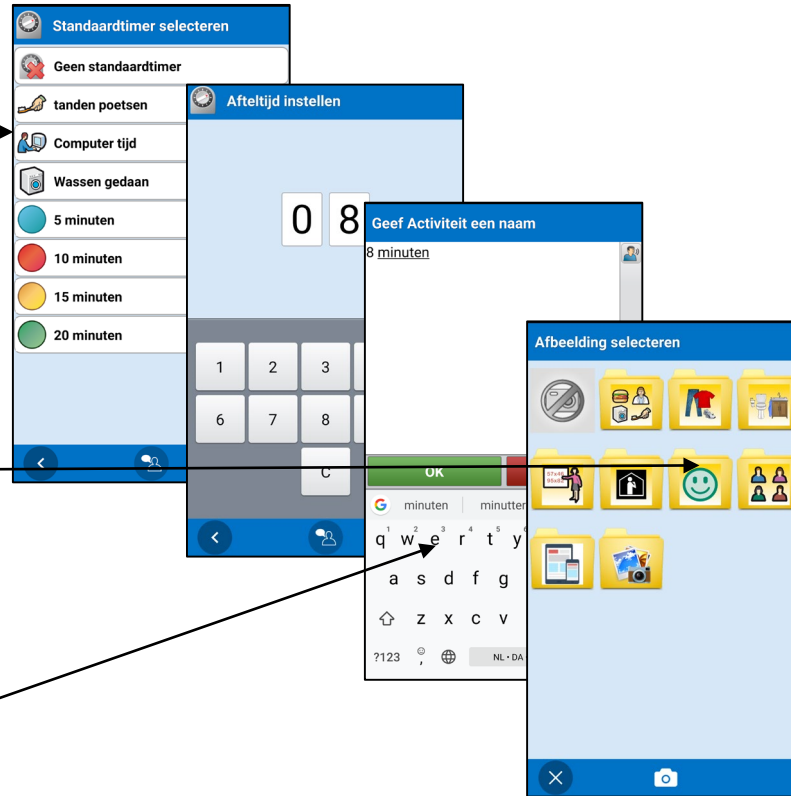

Afvinkbaarheid van activiteiten

Ter bevestiging voor de gebruiker (of anderen via myAbilia) dat de activiteit is voltooid



Gereed

Is het nodig dat de gebruiker activiteiten kan afvinken?

Ja
Nee

Vrijdag 22 november

Naam: Koffie

Starttijd: 09:00

Eindtijd: ---:--

Duur: ---:--

Hele dag: Nee

Verwijderen na: Ja

Categorie: Geen

OK

Rechtstreeks toevoegen aan de standaardactiviteit

Afvinken en Alarm

Alarm alleen op begintijd

OK

Of onthoud dat dit kan worden geselecteerd wanneer een activiteit wordt toegevoegd

Standaardactiviteiten gebruiken

- Voorgeprogrammeerde activiteiten maken het makkelijker om activiteiten toe te voegen
- Voorgestelde activiteiten kunnen stimulerend en motiverend werken

Welke **standaardactiviteiten** heeft de gebruiker nodig?




Het is ook mogelijk om functies te koppelen aan standaardactiviteiten. Zie [Een functie koppelen aan een activiteit.](#)



Standaardtimers gebruiken

- Voorgeprogrammeerde timers maken het makkelijker om timers toe te voegen
- Het is mogelijk meerdere timers tegelijk te laten lopen en ze te onderscheiden met namen en afbeeldingen


Welke **standaardtimers** heeft de gebruiker nodig?

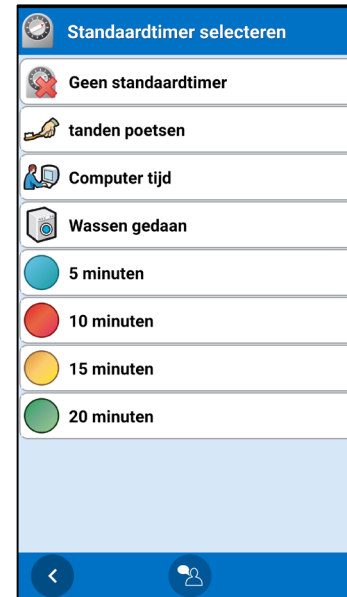

Alarm: alarmgeluid

Hoelang klinkt het alarm (maximaal)?

Signaal (speelt eenmaal of maximaal 5
seconden geluid af)
15 seconden
30 seconden
1 minuut
2 minuten
5 minuten

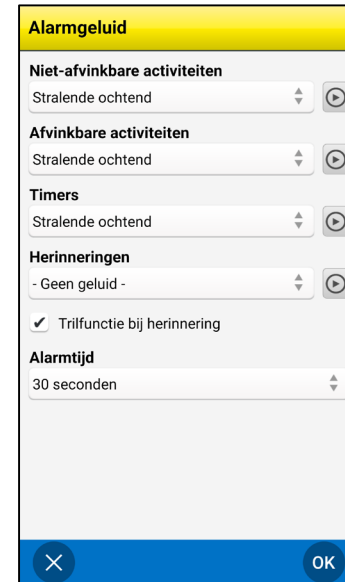


Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

- Hiermee worden ongewenste wijzigingen in instellingen, standaardactiviteiten en standaardtimers verhinderd

Moet het menu Instellingen van HandiCalendar met een code worden beschermd?

Ja

Nee

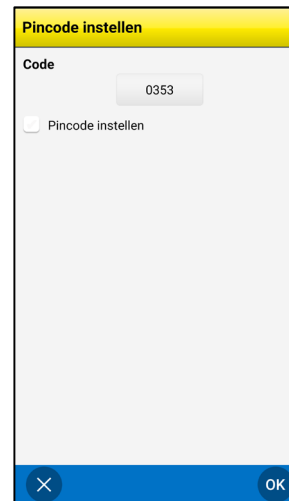

handi

Een hulpmiddel om veilig en
onafhankelijk te zijn

Lees meer op www.abilia.com



ABILIA