

# Handleiding voor aanpassingen voor HandiCalendar

---

Een handleiding voor de belangrijkste aanpassingen en instelling in HandiCalendar voor iOS.





HandiCalendar




# Instellingen voor meldingen

Hoe moeten alarmmeldingen van HandiCalendar worden weergegeven?


Stroken  
Meldingen

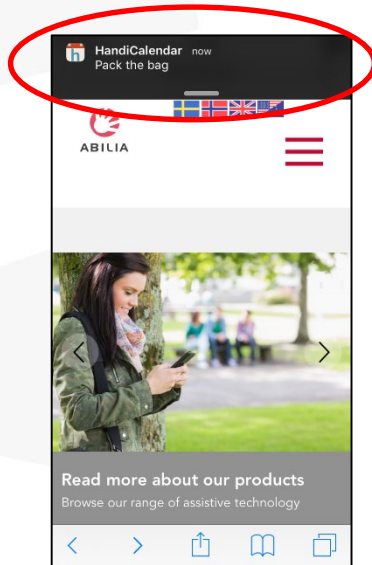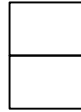

*Strook  
(huidige  
instelling)*

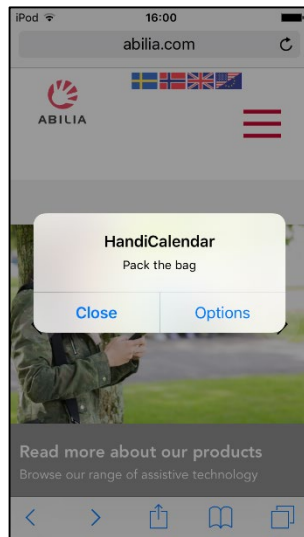

*Melding  
(aanbevolen)*

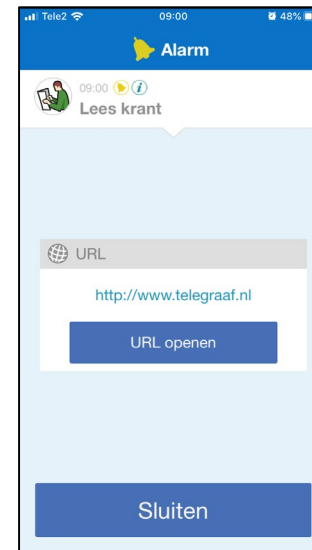

*HandiCalendar  
Alarmweergave*

*(Als het scherm is  
ingeschakeld en  
HandiCalendar  
actief is, wordt de  
alarmweergave  
direct  
weergegeven)*



# Ondersteuning van afbeeldingen: myAbilia




Heeft de gebruiker ondersteuning van afbeeldingen nodig?

Ja   
Nee

Zo ja, welke afbeeldingenbibliotheek?

Basisafbeeldingen	<input type="checkbox"/>
Badkamer	<input type="checkbox"/>
Kleren	<input type="checkbox"/>
Handi	<input type="checkbox"/>
School	<input type="checkbox"/>
Smileys	<input type="checkbox"/>
Overig	<input type="checkbox"/>

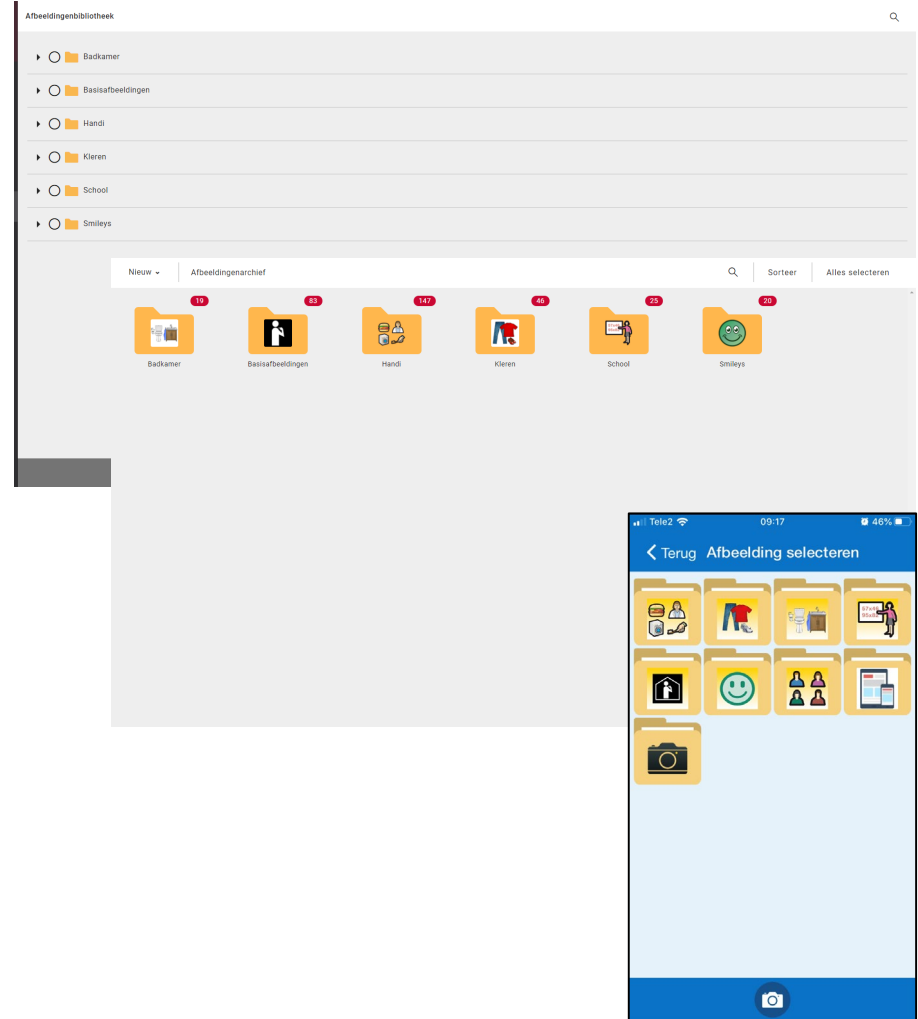

Gebruik myAbilia om het afbeeldingenarchief aan te passen voor de Handi.


# Spraakondersteuning

Moet spraakondersteuning (synthese) worden gebruikt?

Ja  
Nee


1. Druk op de knop voor *spraakondersteuning* om deze te markeren.
2. Druk ergens op om een beschrijving ervan te horen.

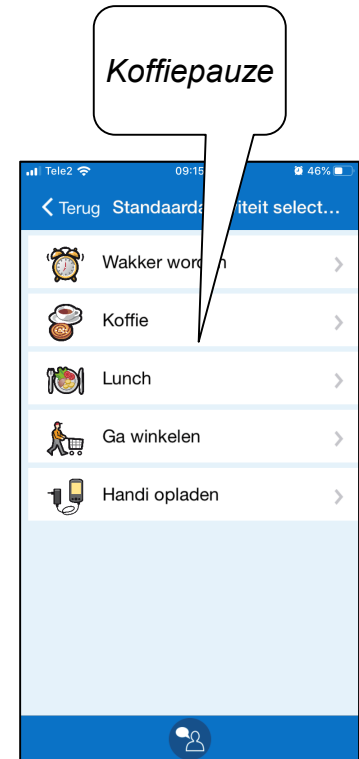


# Kalenderweergave: weergave


Hoe moeten activiteiten worden weergegeven wanneer de app wordt geopend?

In een lijst  
Naast een tijdlijn  
In een weekweergave  
In een maandweergave


<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

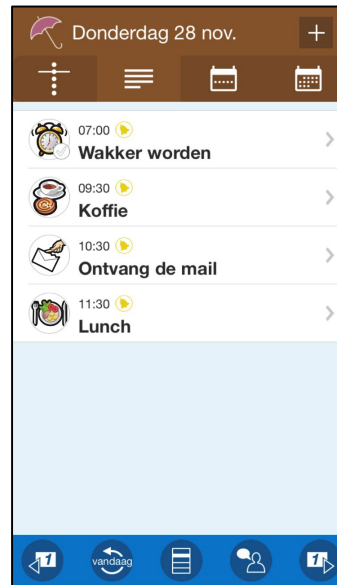

Lijstweergave

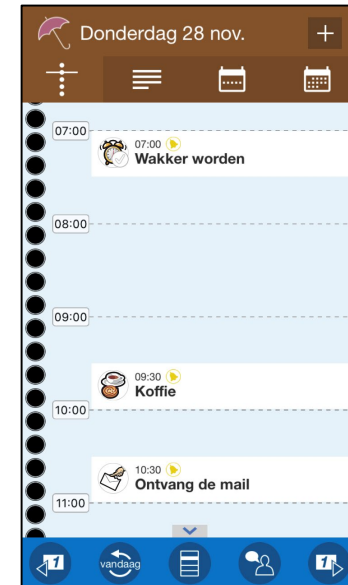

Tijdlijn

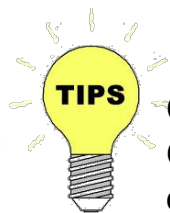

Op een iPad kunt u bovenaan de pagina tussen de weergaven schakelen.  
Op een iPhone gaat u naar het menu Kalender en selecteert u Weekweergave of Maandweergave.

# Kalenderweergave: bladeren

Moet de gebruiker terug kunnen bladeren op de dag?


Ja   
Nee

Moet de gebruiker vooruit kunnen bladeren vanaf de huidige dag?

Niet toegestaan   
Ja, maximaal 6 dagen   
Ja, onbeperkt

Moet de gebruiker terug kunnen bladeren naar de afgelopen dagen?

Ja   
Nee

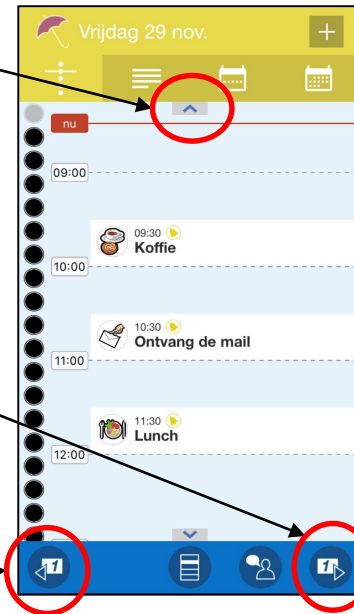



# Kalenderweergave: activiteiten

Moet het tijdstip van de activiteit digitaal worden weergegeven?

Ja


Nee




Moet de tekst van de activiteit worden weergegeven?

Ja

Nee

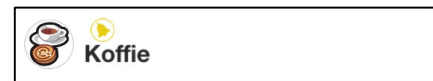

# Activiteitsweergave

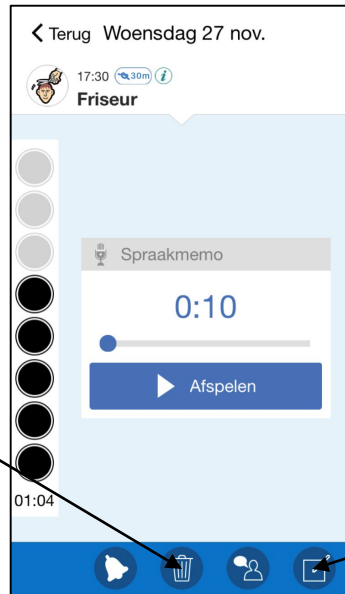

Moet de gebruiker een activiteit kunnen verwijderen?

Ja   
Nee

Moet de gebruiker een activiteit kunnen bewerken?

Ja   
Nee



Laatste kwartier als 5  
stippen  
Digitaal aftellen





# Activiteit toevoegen: standaardalarm

Wat voor alarm moet standaard worden geselecteerd?

Alarm (audiosignaal)   
Stil alarm (stil)   
Geen alarm (helemaal geen melding)

Het alarmtype kan vervolgens per activiteit worden ingesteld.

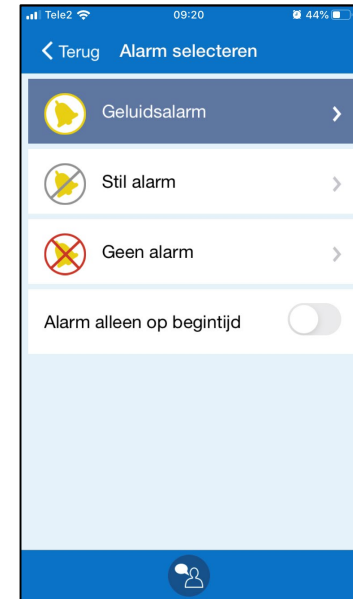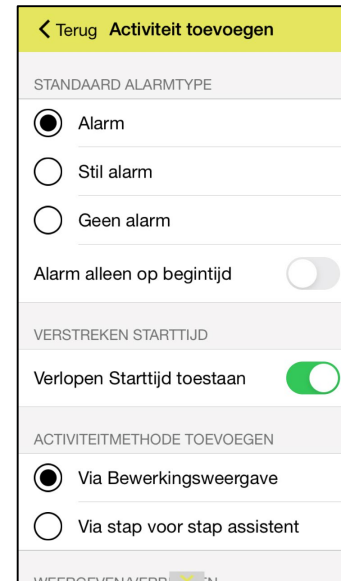

# Activiteit toevoegen



Moet de gebruiker activiteiten kunnen toevoegen aan een begintijd die is verstreken?

Ja   
Nee

Moet de gebruiker activiteiten toevoegen via de bewerkweergave of via de stappen van wizard?

Via de bewerkweergave   
Via de stappen van de wizard

Bewerkweergave

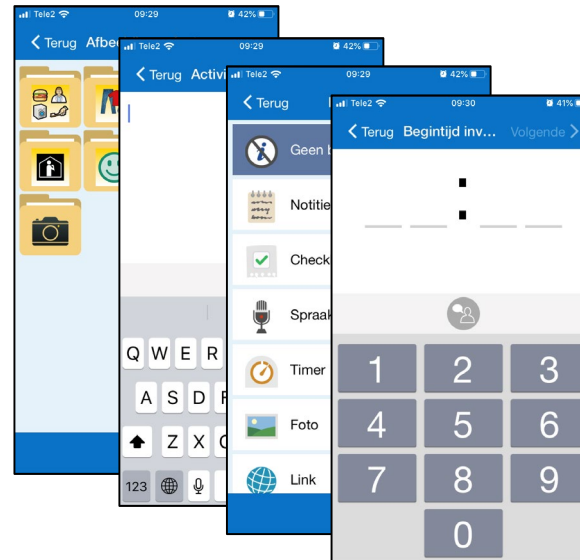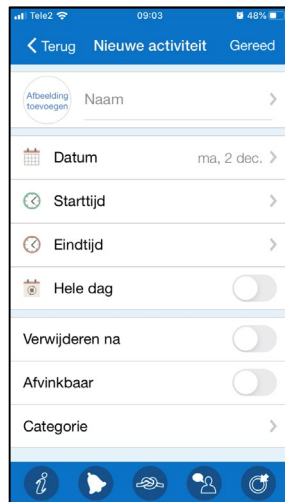

Stap voor stap



Selecteer dit bij **Instellingen|Activiteit toevoegen**.

# Een activiteit toevoegen via de bewerkweergave



Welke vensters zijn beschikbaar als de bewerkweergave wordt gebruikt?

Moet de gebruiker het type activiteit kunnen selecteren?

Ja   
Nee

Moet de gebruiker een standaardactiviteit kunnen selecteren?


Ja   
Nee

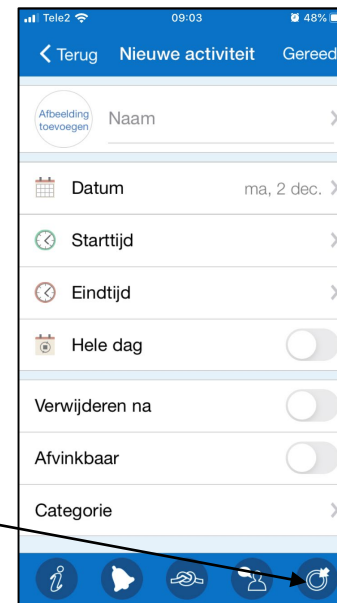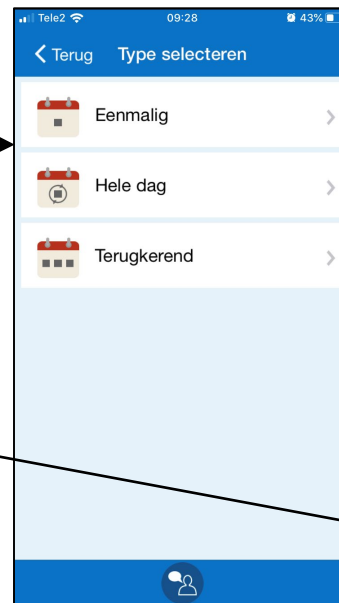

# Een activiteit stap voor stap toevoegen

Welke vensters zijn beschikbaar als de wizard wordt gebruikt?

- Datum selecteren
- Type activiteit selecteren
- Standaardactiviteit selecteren
- Foto selecteren
- Geef activiteit een naam
- Informatie selecteren
- Verwijderen na en Afvinkbaar
- Alarm selecteren
- Herinneringen invoeren
- Categorie selecteren
- Eindtijd invoeren

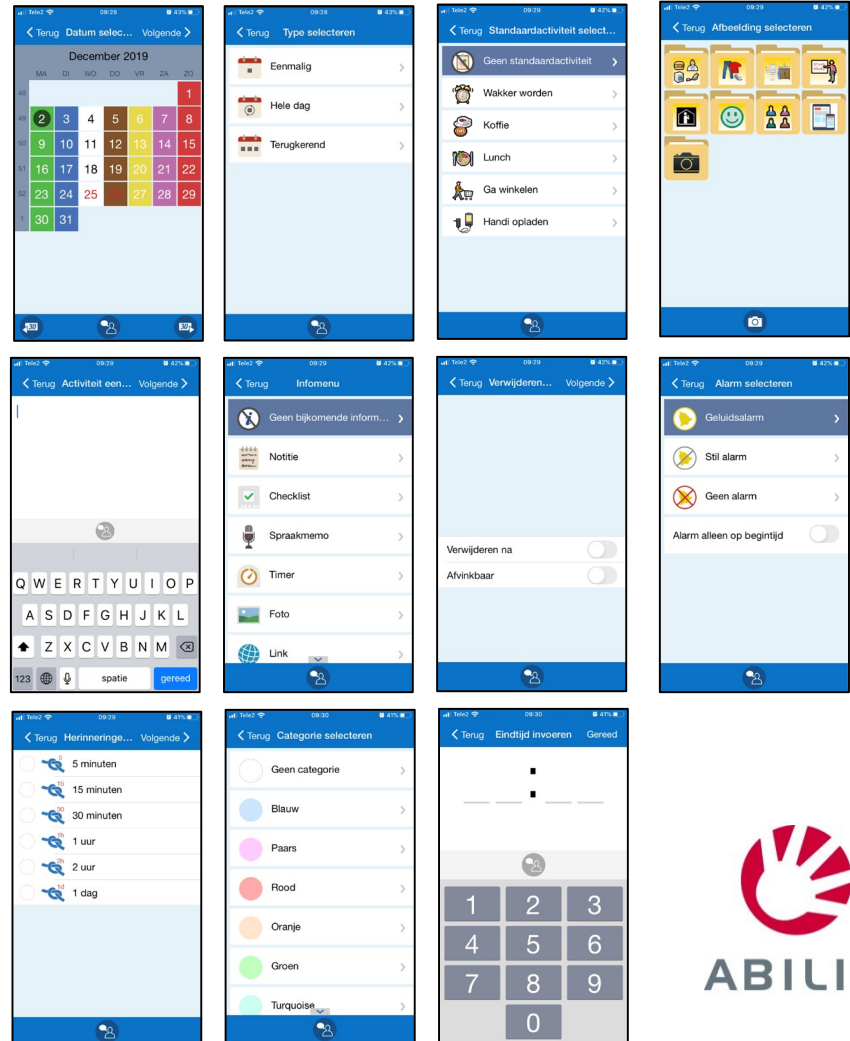Selecteer dit bij **Instellingen|Activiteit toevoegen**.

# Bewerkweergave

Welke functies moet de bewerkweergave bevatten?

Datum	<input type="checkbox"/>
Eindtijd	<input type="checkbox"/>
Hele dag	<input type="checkbox"/>
Afvinkbaarheid	<input type="checkbox"/>
Verwijderen na	<input type="checkbox"/>
Categorie	<input type="checkbox"/>

Herinnering	<input type="checkbox"/>
Alarmtype	<input type="checkbox"/>
Info	<input type="checkbox"/>

Herinnering

Alarmtype

Info



Selecteer dit bij **Instellingen|Bewerkweergave**.

# Een functie koppelen aan een activiteit

- Lees informatie wanneer nodig
- Niet nodig om te zoeken

Welke functies moeten worden weergegeven in het Infomenu en kunnen worden gekoppeld aan een activiteit?

Notitie	<input type="checkbox"/>
Checklist	<input type="checkbox"/>
Spraakmemo	<input type="checkbox"/>
Timer	<input type="checkbox"/>
Foto	<input type="checkbox"/>
Link	<input type="checkbox"/>
Adres	<input type="checkbox"/>
Contactpersoon	<input type="checkbox"/>
Telefoon	<input type="checkbox"/>
Sms	<input type="checkbox"/>

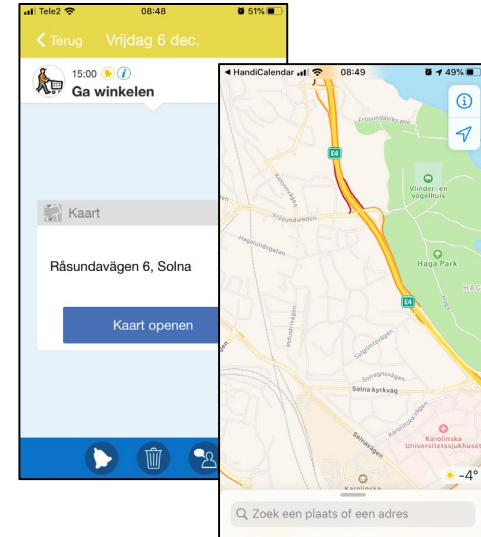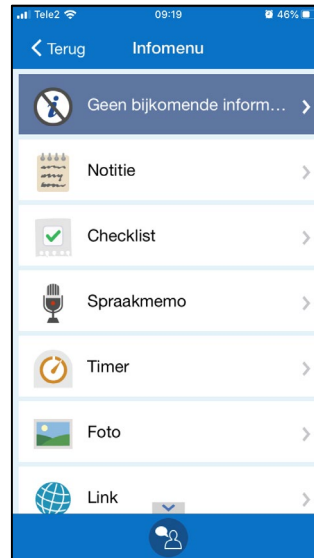

*Voorbeeld van een gekoppeld adres*

Selecteer dit bij **Instellingen|Infomenu**.

# Funcities in het menu Kalender

Moet de gebruiker nieuwe activiteiten kunnen toevoegen?

Ja

Nee

Moet de gebruiker een timer kunnen gebruiken?

Ja

Nee

Moet de gebruiker kunnen zoeken naar activiteiten?


Ja

Nee

Moet de gebruiker standaardactiviteiten en standaardtimers kunnen beheren?

Ja

Nee

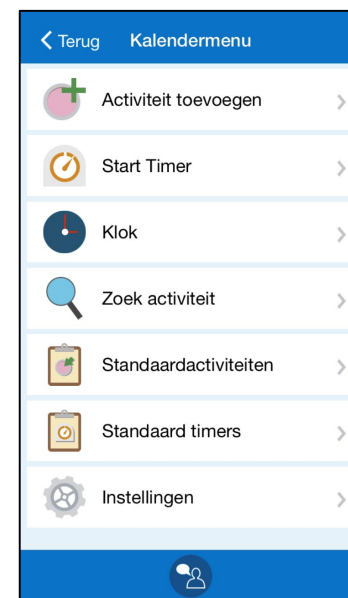

# Kalenderweergave: tijdweergave

Moet het datumveld van de agenda een analoge klok of een knop Nieuwe activiteit tonen?

Analoge klok   
Knop Activiteit toevoegen



Moet een maand worden gemarkeerd met een symbool of een weeknummer?

Maandsymbool   
Maandpictogram   
Weeknummer   
Geen



Moeten de dagen weekdagkleuren hebben?

Weekdagkleuren   
Geen weekdagkleuren






Groen: maandag  
Blauw: dinsdag  
Wit: woensdag  
Bruin: donderdag  
Geel: vrijdag  
Roze: zaterdag  
Rood: zondag



# Klokweergave

Moet het scherm een analoge of digitale klok hebben?

Analoog	<input type="checkbox"/>
Digitaal	<input type="checkbox"/>
Analoog en digitaal	<input type="checkbox"/>

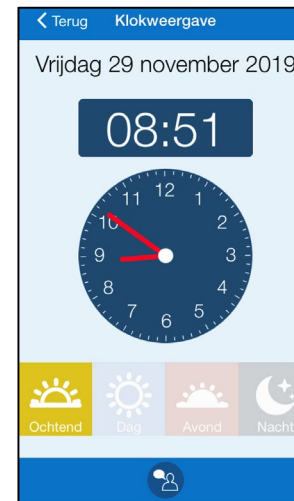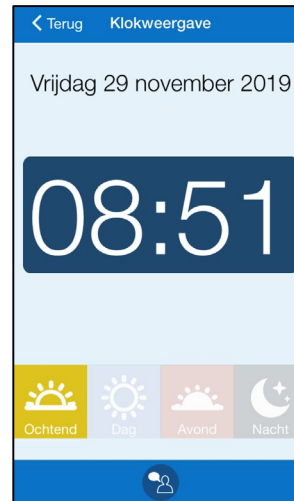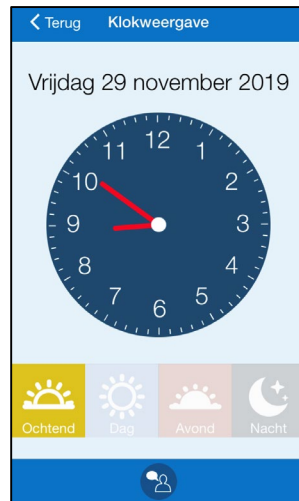

# Weekweergave

Moeten terugkerende activiteiten worden weergegeven?


Ja   
Nee

Hoeveel dagen moeten worden weergegeven in de weekweergave?

5   
7

Hoe moeten activiteiten worden weergegeven?

Altijd tijd   
Foto

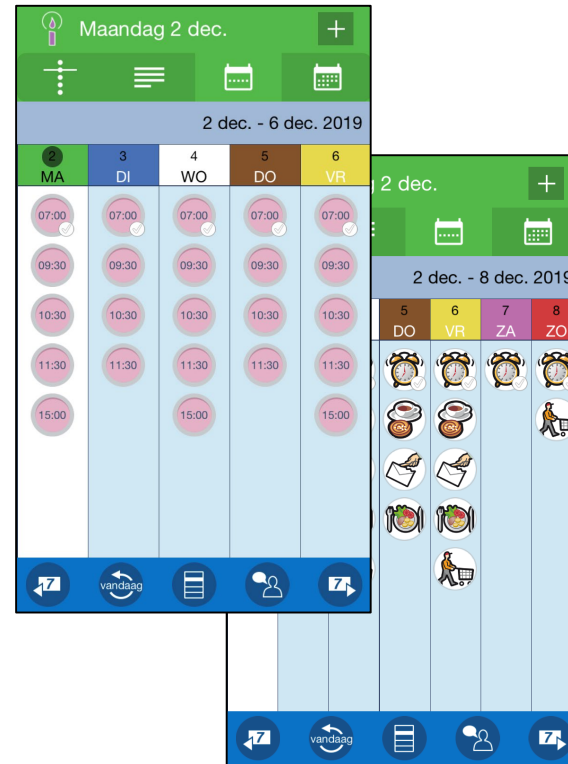

# Start timer

Moet de gebruiker standaardtimers kunnen selecteren?


Ja   
Nee

Moet de gebruiker een afbeelding kunnen selecteren voor de nieuwe timer?

Ja   
Nee

Moet de gebruiker tekst kunnen toevoegen aan een nieuwe timer?

Ja   
Nee

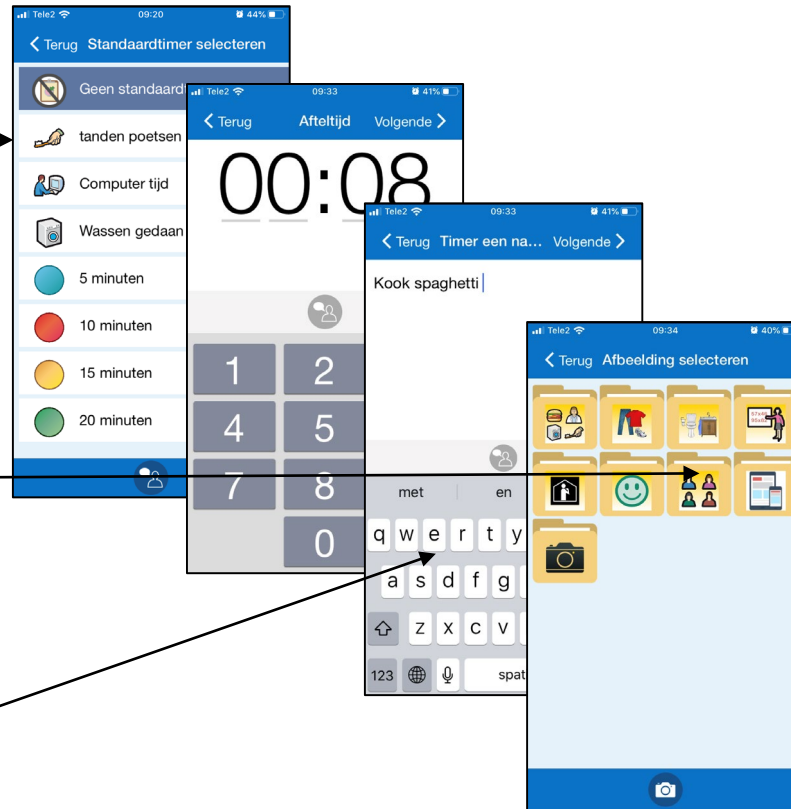

# Afvinkbaarheid van activiteiten

Ter bevestiging voor de gebruiker (of anderen via myAbilia) dat de activiteit is voltooid




Niet gereed




Gereed

Is het nodig dat de gebruiker activiteiten kan afvinken?

Ja   
Nee

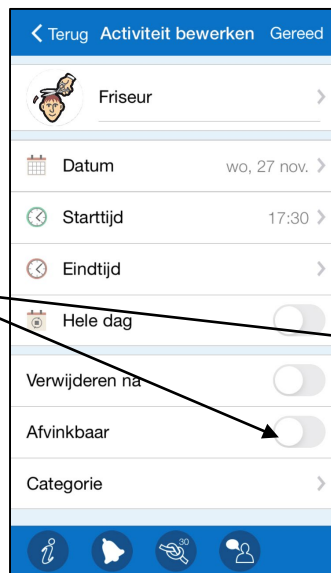

*Rechtstreeks toevoegen aan de standaardactiviteit*

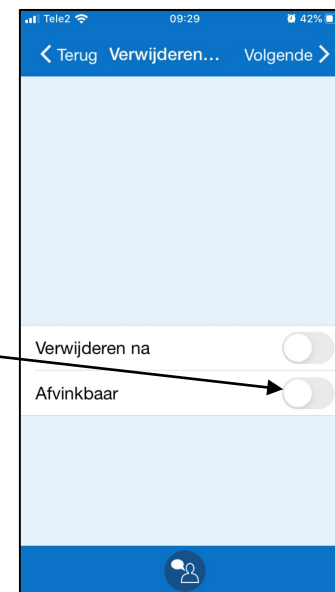

*Of onthoud dat dit kan worden geselecteerd wanneer een activiteit wordt toegevoegd*

# Standaardactiviteiten gebruiken

- Voorgeprogrammeerde activiteiten maken het makkelijker om activiteiten toe te voegen
- Voorgestelde activiteiten kunnen stimulerend en motiverend werken

Welke **standaardactiviteiten** heeft de gebruiker nodig?




Het is ook mogelijk om functies te koppelen aan standaardactiviteiten. Zie [Een functie koppelen aan een activiteit.](#)



# Standaardtimers gebruiken

- Voorgeprogrammeerde timers maken het makkelijker om timers toe te voegen
- Het is mogelijk meerdere timers tegelijk te laten lopen en ze te onderscheiden met namen en afbeeldingen


Welke **standaardtimers** heeft de gebruiker nodig?

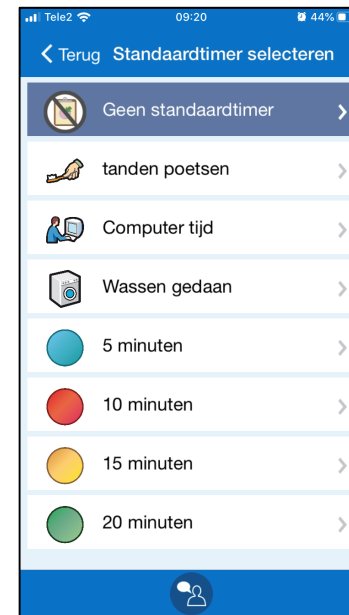

# Alarm: alarmgeluid

Hoelang klinkt het alarm (maximaal)?

De duur van het geluid staat tussen haakjes achter de naam van het alarmgeluid.

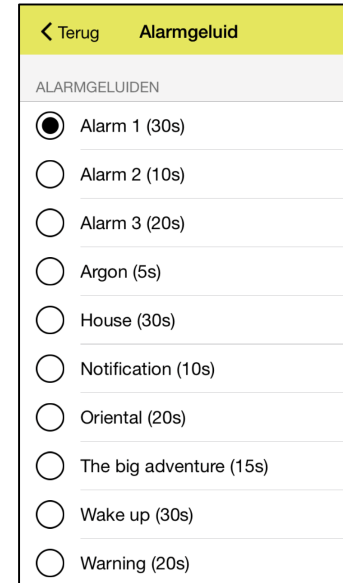

# Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

- Hiermee worden ongewenste wijzigingen in instellingen, standaardactiviteiten en standaardtimers verhinderd

Moet het menu Instellingen van HandiCalendar met een code worden beschermd?

Ja

Nee





# handi

Een hulpmiddel om veilig en  
onafhankelijk te zijn

Lees meer op [www.abilia.com](http://www.abilia.com)



ABILIA