

MEMOday 2

Art.nr. 508270



Inhoud

Inhoud	2
1. Introductie	3
2. Aan de slag	3
3. Spraakondersteuning	3
4. Achtergrondkleur wijzigen	4
5. Tijdsintervallen	4
6. Batterijback-up	4
7. MEMOday in-/uitschakelen	5
8. Scherm	5
9. Onderhoud/schoonmaken	6
10. Milieu	6
11. Technische specificaties	6
12. Meegeleverde onderdelen	7
13. Revisie	7
14. Overeenstemming met de Richtlijn medische hulpmiddelen	7
15. Veiligheid en aansprakelijkheid	7

1. Introductie

De MEMOday herinnert u eraan welke dag en hoe laat het is. Het duidelijke scherm geeft tijd, weekdag, datum en dagdeel weer. De tekst kan ook hardop worden voorgelezen. Door weer te geven of het dag of nacht is, kan de MEMOday voorkomen dat de gebruiker per ongeluk midden in de nacht een familielid belt.

De MEMOday moet op een centrale plek in huis worden neergezet. Het apparaat wordt met de meegeleverde lader op het stopcontact aangesloten. De MEMOday kan gemakkelijk aan de behoeften van de gebruiker worden aangepast.

Als de MEMOday geen stroom meer krijgt (bijvoorbeeld bij een storing), verdwijnt de tekst. Wanneer er weer stroom is zal het apparaat echter weer normaal werken.

De tijd van de MEMOday wordt automatisch aangepast aan de zomer- en wintertijd.

2. Aan de slag


1. Denk na over hoe u de MEMOday wilt introduceren. Sommige mensen willen geen “hulpmiddelen” gebruiken, daarom werkt het misschien beter om het apparaat aan te bieden als “cadeau”.
2. Bepaal waar in huis de MEMOday geplaatst moet worden. Het apparaat moet goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld bij de telefoon of op het aanrecht. Vermijd weerspiegeling in het scherm van lampen of zonlicht door het raam.
3. Steek de meegeleverde lader in een stopcontact en in de aansluiting aan de zijkant van de MEMOday.
4. Houd de *Aan/uit*-knop aan de zijkant van de MEMOday ingedrukt tot het scherm oplicht.
5. Volg de weergegeven instructies om taal, land, tijd en datum in te stellen, alsmede welke informatie op het display moet worden weergegeven. Zie hoofdstuk 8. *Scher*m voor meer informatie.
6. Zorg dat de lader altijd aangesloten blijft. Het scherm blijft alleen aan als de MEMOday is aangesloten op het stopcontact.

Opmerking: Gebruik alleen de meegeleverde lader voor het product. Neem contact op met uw leverancier wanneer u een nieuwe lader nodig heeft.

3. Spraakondersteuning

Druk zachtjes op het scherm. De MEMOday zal voorlezen waarop is gedrukt. Zorg dat de spraakondersteuning is ingeschakeld, zie hoofdstuk 8. *Scher*m.

4. Achtergrondkleur wijzigen

Wanneer u op de knop  drukt, verandert de achtergrondkleur van de MEMOday van licht naar donker of van donker naar licht.

Lichte achtergrond:



Donkere achtergrond:



Let op! Als u Kleur wijzigen heeft gedeselecteerd, verandert de achtergrondkleur van MEMOday automatisch gedurende de nacht, dat wil zeggen van 23:00 tot 6:00 uur.

5. Tijdsintervallen

De MEMOday toont de dagdelen als tekst.

De tijdsintervallen hiervoor zijn als volgt geprogrammeerd:

vroege ochtend:	06:00	–	09:00
ochtend:	09:00	–	12:00
middag:	12:00	–	18:00
avond:	18:00	–	23:00
nacht:	23:00	–	06:00

's Nachts wordt de helderheid van het scherm automatisch verlaagd.

6. Batterijback-up


Als de lader niet is aangesloten of bij stroomuitval wordt een bericht weergegeven met het verzoek om de lader aan te sluiten. Na één minuut zonder stroom wordt het scherm zwart.

Wanneer de voeding van de MEMOday weer wordt hersteld (de lader wordt aangesloten of de stroom is weer terug na een uitval), gaat het scherm weer aan en worden de juiste tijd, dag van de week, datum en deel van de dag opnieuw weergegeven. De instellingen worden opgeslagen met een ingebouwde batterij.

Als de MEMOday langdurig geen stroom krijgt (meerdere weken), kan het nodig zijn om taal, land, tijd, datum en weergave-instellingen opnieuw in te stellen.

7. MEMOday in-/uitschakelen

Tijdens normaal gebruik staat de MEMOday aan zodat de gebruiker de informatie op het scherm altijd kan zien. U kunt het scherm uitschakelen door kort op de *Aan/uit*-knop te drukken.


Als de MEMOday gedurende langere tijd niet gebruikt gaat worden, kunt u het apparaat uitschakelen door de *Aan/uit*-knop ingedrukt te houden tot twee opties op het scherm worden weergegeven. Druk op  om de MEMOday uit te schakelen.

8. Scherm

U kunt kiezen welke informatie op het scherm wordt weergegeven.

Ga naar de instellingen door de *Aan/uit*-knop ingedrukt te houden tot twee opties worden weergegeven. Druk op  om de instellingen te starten.

De instellingen bestaan uit de volgende stappen:

- **Taal instellen.** Talen met het symbool  hebben de functie voor spraakondersteuning. Wanneer de taal geselecteerd is, is het symbool groen  als de spraakondersteuning is ingeschakeld, of rood  als de functie is uitgeschakeld. Druk op het symbool om de instelling te wijzigen.
- **Spraakondersteuning** . Deze stap wordt alleen weergegeven wanneer spraakondersteuning geselecteerd is. Stel het *Volume* en de *Spreeksnelheid* in voor het voorlezen van de informatie op het scherm. Kies ook of alle tekst moet worden voorgelezen of alleen waarop wordt gedrukt.
- **Kies land.** Dit is het land waar de MEMOday wordt gebruikt. Daarmee wordt bepaald hoe de tijd wordt weergegeven en of de klok wordt aangepast voor zomer- en wintertijd.
- **Tijd en datum instellen.** Stel de huidige tijd, jaar, maand en dag in.
- **Dataweergave instellen** . Hier kunt u selecteren welke onderdelen op het scherm moeten worden weergegeven. Doorgehaalde opties worden niet weergegeven.

In de onderstaande afbeelding ziet u alle informatie die kan worden weergegeven:



9. Onderhoud/schoonmaken

Reinig de MEMOday met een vochtige doek met milde zeep. Gebruik geen sterke oplosmiddelen. Het product mag niet in water worden ondergedompeld.

10. Milieu

De verpakking kan als oud papier worden gerecycled. Het product of de batterij moeten worden afgedankt als elektronisch afval of bij de leverancier worden ingeleverd.

11. Technische specificaties

Afmetingen (H x B x D):	140 x 185 x 95 mm
Gewicht:	0,35 kg
Batterij:	Ingebouwde, oplaadbare lithiumionaccu, 3,7 V
Lader:	5,0 V, 2000 mA (midden positief). Gebruik alleen de meegeleverde lader. Gebruik om een nieuwe lader te bestellen het artikelnummer <i>508258 Voeding MEMOday</i> .
Scherm:	7 inch
Beschikbare talen:	Zweeds, Noors, Deens, Fins, IJslands*, Noord-Samisch, Engels, Duits, Nederlands, Vlaams, Frans, Spaans, Italiaans, Sloveens*, Bosnisch*, Kroatisch*, Servisch*, Tsjechisch, Pools, Albanees*, Arabisch, Perzisch*, Turks, Somalisch*, Hongaars*, Russisch, Grieks, Kannada* * Geeft aan dat spraakondersteuning niet beschikbaar is in die taal.

12. Meegeleverde onderdelen

MEMOday	1 st.
MEMOday-lader/-voeding, art.nr.: 508259	1 st.
Gebruikershandleidingen	

13. Revisie

Om de MEMOday terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, gaat u naar Instellingen en stelt u de vereiste taal en land in, zie hoofdstuk 8. *Scherm*. Maak het apparaat schoon zoals beschreven in hoofdstuk

9. *Onderhoud/schoonmaken*, en controleer of de lader niet beschadigd is. Als de lader beschadigd is, neemt u contact op met de leverancier om een nieuwe te bestellen.

14. Overeenstemming met de Richtlijn medische hulpmiddelen

De MEMOday wordt aangeboden als medisch hulpmiddel van Klasse I voor mensen met cognitieve stoornissen en voldoet aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

15. Veiligheid en aansprakelijkheid

Abilia heeft de risico's met betrekking tot dit product geanalyseerd in overeenstemming met EN ISO 14971.

Het is altijd belangrijk de veiligheid te overwegen bij een eerste gebruik van dit product en bij volgend gebruik. Het is niet mogelijk om in deze gebruiksaanwijzing alle manieren te vermelden waarop het product niet mag worden gebruikt. Als u niet zeker weet of u het product goed ingesteld of in gebruik genomen heeft, raden we aan om contact met uw leverancier op te nemen.

Abilia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, schade of gevolgschade voortvloeiend uit onjuist gebruik, gebrek aan follow-up, onjuiste instelling, onjuiste aansluiting, en dergelijke. De financiële aansprakelijkheid van Abilia is altijd beperkt tot de waarde van het product zelf.

CE



Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden
Phone +46 (0)8-594 694 00 | info@abilia.se | www.abilia.se

