

# MEMOdayplanner 3

Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-uurs uitvoering

Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-uurs uitvoering





# Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	4
1.1 Twee uitvoeringen: 12-uurs of 24-uurs .....	4
2. Overzicht van het apparaat.....	5
2.1 Bijgeleverde onderdelen.....	5
3. Installatie .....	6
4. De klok instellen .....	6
5. Alarmen in de MEMOdayplanner.....	7
5.1 Alarm instellen.....	7
5.2 Een alarm uitzetten .....	8
5.3 Ingestelde alarmen controleren.....	8
5.4 Alarmen verwijderen.....	8
6. MEMOdayplanner aanpassen .....	9
6.1 Tijdweergave als lichtkolom of lichtpunt .....	9
6.2 Knipperend licht om alarm aan te geven .....	9
6.3 Digitale tijdweergave .....	9
6.4 Helderheid lichtkolom/lichtpunten instellen.....	10
6.5 Helderheid digitale klok aanpassen.....	10
6.6 Alarmvolume aanpassen.....	10
6.7 Begintijden dag en nacht wijzigen .....	10
6.8 12/24-uurs klok selecteren .....	11
6.9 Instelling zomertijd wijzigen.....	11
7. Opslag .....	12
8. Reinigen .....	12
9. Fabrieksinstellingen.....	12
10. Veiligheid en verantwoordelijkheid .....	13
11. Technische gegevens.....	13
11.1 Gebruiksomgeving .....	13
11.2 Geleverde items .....	13
11.3 Reserveonderdelen/accessoires .....	14
11.4 Technische gegevens .....	14
11.5 Naleving richtlijn medische hulpmiddelen.....	15
11.6 Recycling elektronisch afval .....	15

# 1. Inleiding

MEMOdayplanner 3 is een planbord dat de tijd aangeeft en hoe lang het nog duurt voor de volgende activiteit/gebeurtenis. Op een lichtkolom waarop elk kwartier een lichtpunt uitgaat of een stukje naar beneden gaat, kan de gebruiker gemakkelijk zien hoe veel van de dag verstreken is. Door de verschillende kleuren op de lichtkolommen is duidelijk te zien of het dag of nacht is. Voor elk lichtpunt kan je een hoorbaar alarm instellen om de gebruiker te laten weten dat hij of zij op het bord moet kijken omdat er iets te gebeuren staat. De MEMOdayplanner 3 staat op zichzelf en heeft geen internetverbinding nodig. Je kunt op de MEMOdayplanner ook alarmen instellen voor gewenste tijden/lichtpunten.

Het whitebord is magnetisch. Je kunt het gemakkelijk aan je eigen stijl en behoeften aanpassen met tekst, afbeeldingen en symbolen.

Een alarm gaat af met een pieptoon en/of een knipperende lichtpunt. Je kunt het alarm harder of zachter zetten.


In het Ideeënboekje vind je handige tips voor het gebruik van de MEMOdayplanner.

## 1.1 Twee uitvoeringen: 12-uurs of 24-uurs


De MEMOdayplanner 3 is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen, de 12-uurs en de 24-uurs uitvoering. Het verschil is dat de tijd kolom 12 of 24 uur weergeeft en de bijbehorende getallen voorgedrukt staan op de voorkant.

Je kunt de 12-uurs uitvoering van de MEMOdayplanner 3 omzetten in 24 uur en andersom. Breng één van de magnetische tijdstrips aan (verkrijgbaar als accessoire). Ook kan je de begintijd van de dag op een andere tijd instellen. Zie paragraaf 6.7 *Begintijden dag en nacht wijzigen*.


12-uurs uitvoering

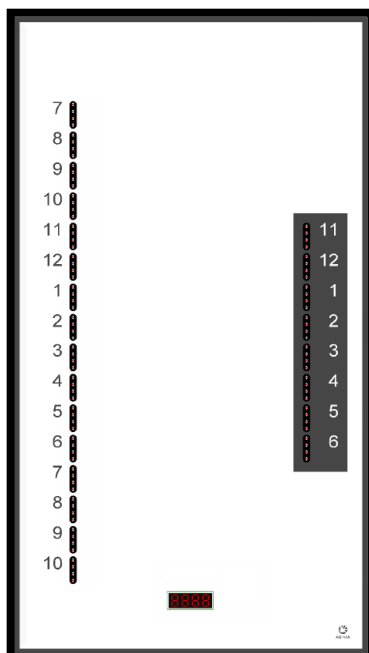

24-uurs uitvoering

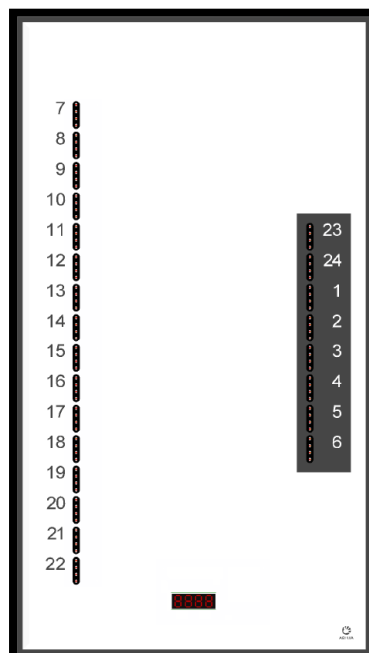

## 2. Overzicht van het apparaat

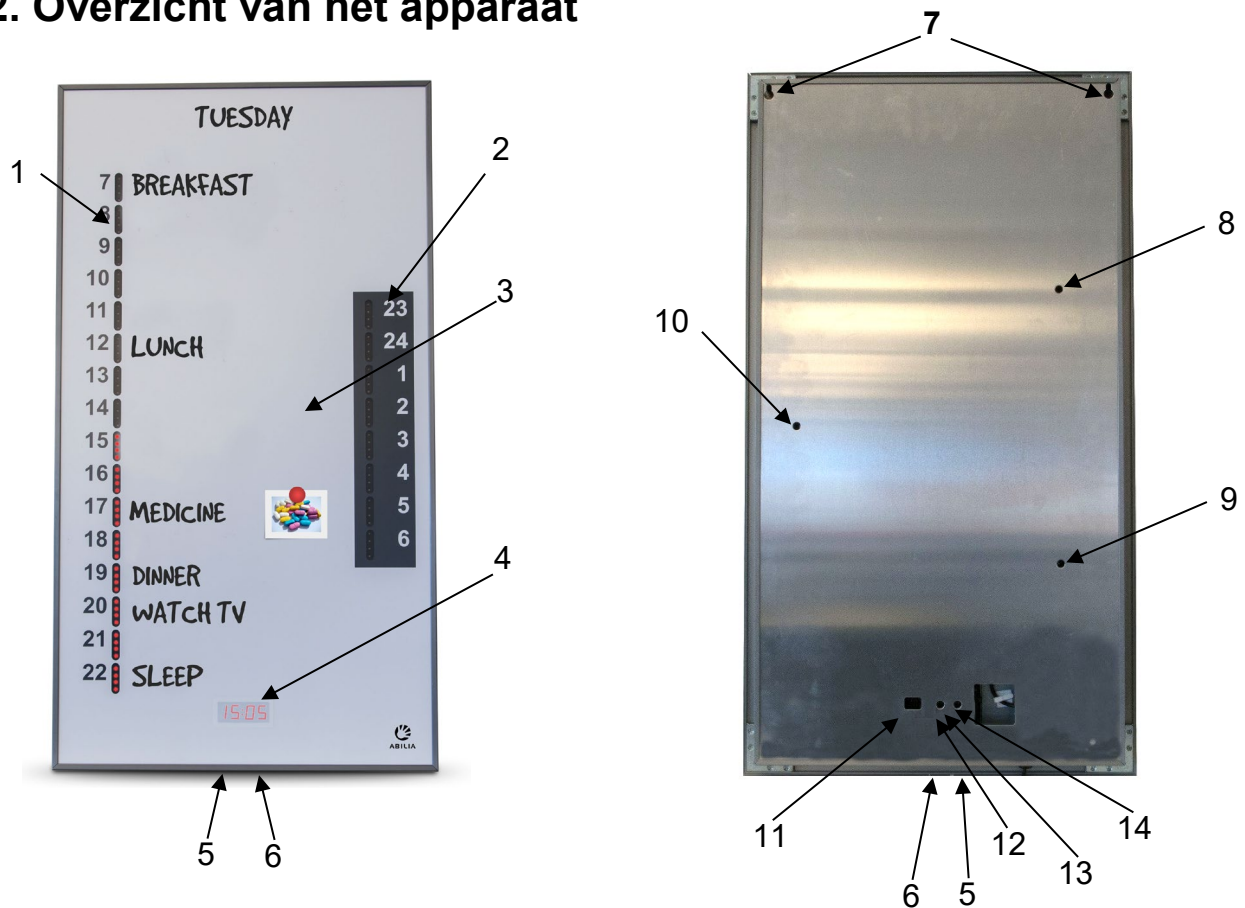

1. Tijdweergave, dag	7. Openingen voor wandbevestiging
2. Tijdweergave, nacht	8. Helderheid aanpassen, ochtend
3. Magnetisch whitebord	9. Helderheid aanpassen, avond
4. Digitale klok	10. Helderheid aanpassen, nacht
5. Alarmknop, 🔔	11. Weergave aanpassen
6. Tijdknop, 🕒	12. Helderheid digitale klok aanpassen
	13. Alarmvolume aanpassen
	14. Uitgang voor het aansluiten van een bedieningsschakelaar

### 2.1 Bijgeleverde onderdelen

MEMOdayplanner wordt geleverd met de volgende onderdelen:

- Stroomadapter
- 3 Whitebordpennen
- Microvezeldoekje
- Schroevendraaier
- Schroeven voor wandbevestiging en een mal voor het boren van gaten.
- Handleiding
- Korte handleiding
- Ideeënboekje



### 3. Installatie


Bevestig de MEMOdayplanner aan de wand met de bijgeleverde schroeven. Gebruik de mal voor de juiste afstand tussen de schroeven. Pas een montage techniek toe die geschikt is voor de wand.








Steek de stroomadapter in het stopcontact. De MEMOdayplanner moet altijd aangesloten zijn op netstroom. Als de stroom uitvalt onthoudt de MEMOdayplanner de ingestelde tijd, deze wordt echter niet weergegeven tot het apparaat weer stroom krijgt.
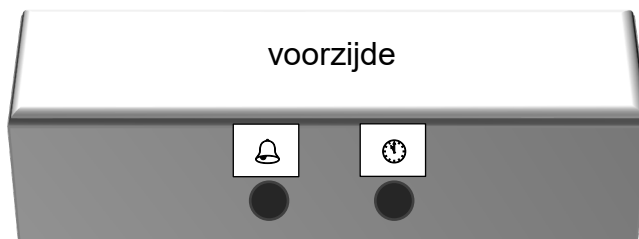
### 4. De klok instellen

Als de MEMOdayplanner is aangesloten op netstroom wordt de tijd digitaal weergegeven op het display van de klok. Bij aflevering van het apparaat staat de klok zo ingesteld dat de tijd automatisch wordt aangepast aan zomer- en wintertijd (EU zomertijd). Zie de volgende instructies voor het instellen van de klok. Automatische aanpassing aan winter- en zomertijd werkt alleen als de datum goed is ingesteld.

Gebruik voor het instellen van de klok de knoppen  (*Alarm*) en  (*Tijd*) aan de onderzijde van MEMOdayplanner.



1. Ga naar tijd instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te houden.
2. Het **uur** knippert. Je kunt het uur nu wijzigen door op de knop  te drukken. Als je de knop langer ingedrukt houdt, verspringen de cijfers sneller.
3. Als je op de knop  drukt, gaan de **minuten** knipperen. Druk op de knop  om de minuten in te stellen. Als je de knop langer dan 1 seconde ingedrukt houdt, verspringen de cijfers sneller.
4. Vervolgens kun je het **jaar**, de **maand** en de dag instellen. Door op de  knop te drukken, ga je naar het volgende onderdeel. Het jaar, de maand en de dag worden weergegeven met respectievelijk een 1, 2 en 3 als eerste cijfer in het display.
5. Als de juiste gegevens zijn ingevuld, druk je op de  knop om af te sluiten. (Als je gedurende 1 minuut niet op de  knop hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)


## 5. Alarmen in de MEMOdayplanner

De MEMOdayplanner kan voor activiteiten alarmen af laten gaan in de vorm van geluidssignalen en een knipperend lichtpunt voor de relevante tijd. Je kunt ervoor kiezen of het lichtpunt moet knipperen als er een alarm afgaat of niet. Zie hiervoor *6.2 Knipperend licht om alarm aan te geven*.





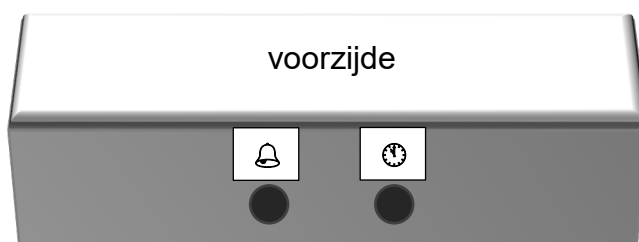



Er kan een alarm worden ingesteld voor elk kwartier binnen een periode van 24 uur. Alle alarmen worden elke dag om dezelfde tijd herhaald.

### 5.1 Alarm instellen

Je kunt een alarm instellen met de knoppen  (*Alarm*) en  (*Tijd*) aan de onderkant van de MEMOdayplanner.



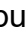

Zo stel je een alarm in:

1. Ga naar de modus alarm instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te houden.  
Na deze 2 seconden gaan alle lichtpunten op de lichtkolom uit, behalve de lichtpunten waarvoor een alarm is ingesteld. Lichtpunten waarvoor een alarm is ingesteld blijven continu branden.  
Het knipperende lichtpunt is het lichtpunt dat je geselecteerd hebt.
2. Ga naar de gewenste tijd met de knop . Als je de knop langer ingedrukt houdt, verspringt het lichtpunt sneller.
3. Druk op de knop  om een alarm in te stellen voor het gekozen lichtpunt. Het lichtpunt zal nu sneller gaan knipperen. Wanneer u naar een volgende lichtpunt gaat met de  knop zal het ingestelde alarm continu blijven branden.
4. Herhaal bovenstaande stappen 2 en 3 om meer alarmen in te stellen. Om een alarm uit te verwijderen gaat u met de  knop naar het lichtpunt en drukt u vervolgens op de  knop. Het lichtpunt zal nu niet meer snel, maar langzaam knipperen.
5. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om de modus alarm instellen te verlaten.  
(Als je een minuut lang niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)



Let op: als de instelmodus voor alarmen actief is, blijven de lichtpunten branden waarvoor een alarm is ingesteld. Er kunnen maximaal 96 alarmen worden ingesteld, voor elk lichtpunt één.

## 5.2 Een alarm uitzetten

Bij het afgaan van een alarm geeft de MEMOdayplanner gedurende 60 seconden een geluidssignaal en gaat het lichtpunt 15 minuten knipperen. Een alarm uitzetten kan op drie manieren:

1. **Vanzelf.** Wacht 60 seconden tot het alarm vanzelf uitgaat. (Het lichtpunt blijft een kwartier knipperen.)
2. **Druk op de bedieningsschakelaar.** Je kunt een alarm uitzetten door op een bedieningsschakelaar te drukken die is aangesloten aan de achterkant van de MEMOdayplanner. Zie hiervoor hoofdstuk 2. *Overzicht van het apparaat*. Hiervoor kan elke bedieningsschakelaar worden gebruikt met een monostekker van 3,5 mm. Neem contact op met Abilia voor ons assortiment bedieningsschakelaars.
3. **Druk op de knop** . Je kunt een alarm uitzetten door op de knop  te drukken aan de onderkant van de MEMOdayplanner.






## 5.3 Ingestelde alarmen controleren

Houd de knop  2 seconden ingedrukt om te kijken voor welke lichtpunten een alarm is ingesteld. Druk nog een keer 2 seconden op de knop  om terug te keren naar de bedieningsmodus. In de bedieningsmodus kan je niet zien voor welke lichtpunten een alarm is ingesteld.

## 5.4 Alarmen verwijderen

Om een alarm te verwijderen doe je hetzelfde als bij 5.1 *Alarm instellen*.


Je kunt ook in één keer alle alarmen verwijderen:

1. Ga naar de modus alarm instellen door de knop  2 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk tegelijkertijd op de knoppen  en  en laat ze na 1 seconde los. Als je een geluidssignaal hoort, zijn alle alarmen verwijderd.
3. Houd de knop  2 seconden ingedrukt om de modus alarm instellen te verlaten. (Als je een minuut lang niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)



## 6. MEMOdayplanner aanpassen

Gebruik een schroevendraaier om de schakelaars 1 tot en met 3 omhoog of omlaag te zetten. Hiermee kan je voor de volgende instellingen kiezen:

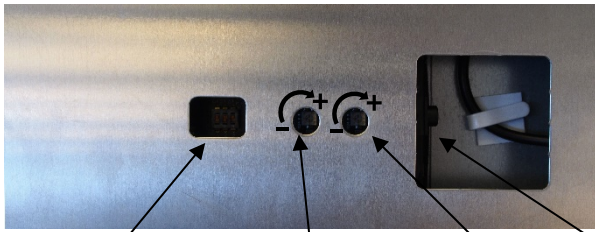

Schakelaar 1-3

Helderheid  
digitale klok

Alarmvolume

Aansluiting bedieningsschakelaar

### 6.1 Tijdweergave als lichtkolom of lichtpunt

De MEMOdayplanner kan de tijd op twee manieren worden weergegeven: als lichtkolom of als lichtpunt.

Als lichtkolom geselecteerd is, wordt de tijd weergegeven in een kolom met lichtpunten waarvan er elk kwartier eentje uitgaat. Als voor lichtpunt wordt gekozen, verplaatst het lichtpunt zich elk kwartier een stukje verder naar beneden om aan te geven welke tijd het is.

Gebruik **Schakelaar 1** om de tijdweergave in te stellen.

Schakelaar 1 omhoog = lichtkolom

Schakelaar 1 omlaag = lichtpunt

### 6.2 Knipperend licht om alarm aan te geven

Je kunt ervoor kiezen om het lichtpunt dat de tijd aangeeft te laten knipperen als er een geluidssignaal wordt gegeven voor een activiteit.

Gebruik hiervoor **schakelaar 2**.

Schakelaar 2 omhoog = knipperend licht bij afgaan alarm

Schakelaar 2 omlaag = constant licht bij afgaan alarm

### 6.3 Digitale tijdweergave

Op de voorkant van de MEMOdayplanner zit een digitale klok. Je kunt ervoor kiezen of je deze klok wel of niet wilt weergeven.

Gebruik **schakelaar 3** voor de digitale klok.

Schakelaar 3 omhoog = digitale klok weergeven

Schakelaar 3 omlaag = geen digitale klok

## 6.4 Helderheid lichtkolom/lichtpunten instellen

Je kunt de helderheid aanpassen van de lichtkolom/lichtpunten op de MEMOdayplanner. De helderheid kan apart ingesteld worden voor overdag en 's nachts. Dit doe je door met een kleine schroevendraaier de schroeven te draaien aan de achterkant van de MEMOdayplanner. Zie hoofdstuk 2. *Overzicht van het apparaat*. Er zijn twee schroeven voor de dagweergave, voor 's ochtends en 's middags.

## 6.5 Helderheid digitale klok aanpassen

Je kunt de helderheid aanpassen van de digitale klok op de MEMOdayplanner. Dit doe je door met een kleine schroevendraaier de schroef te draaien aan de achterkant van de MEMOdayplanner, zie bovenstaande afbeelding.

## 6.6 Alarmvolume aanpassen

Je kunt het volume aanpassen van het alarmsignaal dat de MEMOdayplanner geeft. Dit doe je door met een kleine schroevendraaier de schroef te draaien aan de achterkant van de MEMOdayplanner.

## 6.7 Begintijden dag en nacht wijzigen

De MEMOdayplanner staat meestal ingesteld om de dag weer te geven tussen 7.00 en 23.00 uur. De nacht wordt weergegeven van 23:00 tot 7:00. Dit kun je veranderen door een magneetstrip aan te brengen (zie paragraaf 11.3 *Reserveonderdelen/accessoires*) en de begintijd van de dag te verplaatsen, zoals hieronder beschreven.

**Voorbeeld:** Je wilt de dag om 8.00 uur laten beginnen en om 24.00 uur laten eindigen. De nacht loopt dan van 24:00 tot 8:00.






Knip een geschikte magneetstrip op maat (met 24-uurs of 12-uursweergave of een analoge klok) zodat 7:00 bedekt wordt door 8:00.



Als er geen tijdweergave nodig is, kun je er een witte magneetstrip overheen leggen.









Gebruik een magneetstrip om hetzelfde te doen voor de tijdweergave voor de nacht.

1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. De **begintijd van de dag** gaat nu knipperen (op het display staat bijvoorbeeld 1 07). Druk op de toets  om dit te veranderen. Als je de knop langer ingedrukt houdt, verspringen de cijfers sneller.  
Als je op het display '1 08' ziet staan, begint de dag voortaan om 8.00 uur.
3. Verlaat de instelmodus door drie keer op de knop  te drukken. (Als je gedurende 1 minuut niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)

## 6.8 12/24-uurs klok selecteren







Het is mogelijk om de digitale klok in te stellen als 12- of 24-uurs klok.

1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk op de knop . **12 of 24** gaat nu knipperen (op het display staat bijvoorbeeld 2 24). Druk op de knop  om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs weergave van de digitale klok.
3. Verlaat de instelmodus door twee keer op de knop  te drukken. (Als je gedurende 1 minuut niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)

## 6.9 Instelling zomertijd wijzigen

De MEMOdayplanner kan ingesteld worden om automatisch over te schakelen op zomer- en wintertijd voor de EU of de VS.

Normaal gesproken staat de MEMOdayplanner ingesteld om automatisch over te schakelen op de EU zomertijd. Hieronder lees je hoe je dit kunt veranderen.

1. Ga naar de instelmodus door  en  5 seconden ingedrukt te houden.
2. Druk twee keer op de knop . De **zomertijdfunctie** gaat nu knipperen (op het display staat bijvoorbeeld 3 01). Druk op de knop  om de instelling te veranderen.  
00 = niet automatisch aanpassen aan zomertijd  
01 = automatisch aanpassen aan EU zomertijd  
02 = automatisch aanpassen aan VS zomertijd
3. Verlaat de instelmodus door op de knop  te drukken. (Als je gedurende 1 minuut niet op  hebt gedrukt, sluit de MEMOdayplanner de instelmodus automatisch af.)

## 7. Opslag

Als de MEMOdayplanner niet gebruikt wordt, moet deze binnenshuis worden bewaard bij kamertemperatuur.

## 8 Reinigen

### Onderhoud:

Reinigen met een microvezeldoekje. Bevochtig het doekje met wat water om tekst of hardnekkige sporen te verwijderen. Bij vlekken of sporen die te hardnekkig blijken, kan Abilia de kunststoflaag vervangen tegen betaling.

### Tips:

Is het bord moeilijk schoon te krijgen? Ga met een whiteboardstift over tekst of sporen die moeilijk te verwijderen zijn en veeg ze na een minuut uit.

## 9. Fabrieksinstellingen

De standaard instellingen van de MEMOdayplanner zijn als volgt:

Tijdweergave: Lichtkolom

Knipperend licht bij alarm: Aan

Digitale tijdweergave: Aan

Helderheid lichtkolom dag/nacht: medium

Helderheid en volume digitale klok: medium

Dag- en nachttijden: Dag 07:00 – 23:00, nacht 23:00 – 07:00

12-uurs of 24-uursweergave, afhankelijk van het model

Resetten voor zomertijd: 01 EU-zomertijd

Zie het relevante hoofdstuk van deze handleiding voor het wijzigen van de instellingen. Zie ook hoofdstuk 8 *Reinigen* en paragraaf 11.2 *Geleverde items*.

## 10. Veiligheid en verantwoordelijkheid

Abilia heeft een risicoanalyse uitgevoerd voor het product overeenkomstig ISO 14971: toepassing van risicomanagement bij medische hulpmiddelen. De handleidingen en de technische specificaties van het product zijn opgesteld met inachtneming van de uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen die in dit document zijn opgenomen.

Het is altijd van belang om op de veiligheid te letten bij het eerste en verdere gebruik van dit product. Het is onmogelijk om alle omstandigheden in de handleiding op te nemen waaronder het product niet gebruikt dient te worden. Neem contact op met de leverancier als je niet zeker weet of je het product correct gebruikt of goed hebt ingesteld.

Abilia is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of gevolgschade door onjuist gebruik, het niet nemen van verdere stappen, het onjuist instellen, aansluiten of vergelijkbaar verkeerd gebruik. De financiële aansprakelijkheid van Abilia beperkt zich te allen tijde tot de waarde van het product zelf.

## 11. Technische gegevens

### 11.1 Gebruiksomgeving

De MEMOdayplanner is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.

### 11.2 Geleverde items

Itemnr.	Naam	Omschrijving	Aantal
	MEMOdayplanner 3	12-uurs of 24-uursuitvoering	1 stuk
	Stroomadapter		1 stuk
	Whitebordstift		3 stuks
	Microvezeldoekje	voor het reinigen	1 stuk
	Schroevendraaier	voor instellen helderheid/alarmvolume	1 stuk
	Schroeven/muurpluggen met mal voor boorgaten	voor wandbevestiging	1 set
	Handleiding		1 stuk
	Korte handleiding		1 stuk
	Ideeënboekje		1 stuk

### **11.3 Reserveonderdelen/accessoires**

<b>Itemnr.</b>	<b>Naam</b>
508785	Aanpassingsset MEMOdayplanner 3
508786	Accessoireset MEMOdayplanner 3
508787	Magneetstrips, zonder opdruk (om informatie te bedekken)
508788	Magneetstrips, 24 uur
508789	Magneetstrips, 12 uur
508790	Magneetstrips, klok
508794	Tafelstandaard MEMOdayplanner 3
508795	Pennenbakje MEMOdayplanner 3
508796	Afsluitbare deur MEMOdayplanner 3
	Optionele bedieningsschakelaar (neem contact op met Abilia)
508800	Stroomadapter voor MEMOdayplanner 3

Meer informatie vind je in het Ideeënboekje.

### **11.4 Technische gegevens**

Afmetingen (HxBxD):	713 x 392 x 32 mm
Gewicht:	4,1 kg
Voeding:	9V DC, 1A

Gebruik alleen de originele stroomadapter!

### **11.5 Naleving richtlijn medische hulpmiddelen**

MEMOdayplanner wordt verkocht als een technisch hulpmiddel voor mensen met cognitieve beperkingen en voldoet aan de eisen van de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EG, met inbegrip van de relevante eisen voor elektromagnetische compatibiliteit (MC), elektrische veiligheids- en risicoanalyse.

### **11.6 Recycling elektronisch afval**

Dit product bevat elektronische onderdelen die aan het eind van de levensduur gerecycled moeten worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektronisch afval.





Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sweden  
Phone +46 (0)8-594 694 00 | [info@abilia.se](mailto:info@abilia.se) | [www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norway  
Phone +47 23 28 94 00 | [info@abilia.no](mailto:info@abilia.no) | [www.abilia.no](http://www.abilia.no)

Abilia UK Ltd, Unit 12 Buckingham Business Park, Swavesey,  
Cambridge, CB24 4AE, United Kingdom  
Phone +44 (0)1954 281210 | [info@abilia.uk](mailto:info@abilia.uk) | [www.abilia.uk](http://www.abilia.uk)

