


MEMOplanner starten voor de eerste keer

Gefeliciteerd met uw nieuwe MEMOplanner. Hier leest u hoe u aan de slag kunt gaan.

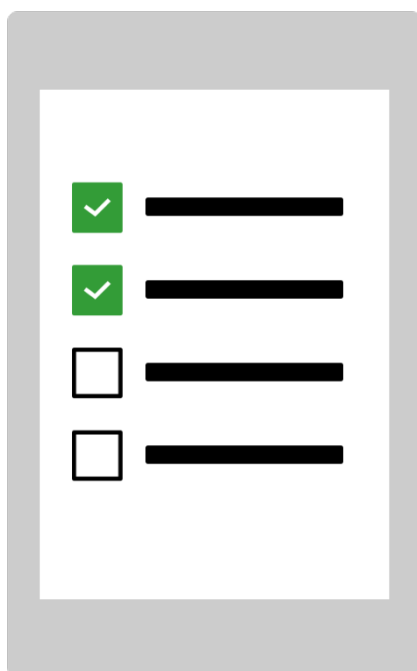


1. De voedingsadapter aansluiten

Sluit de voedingsadapter aan tussen de MEMOplanner en een stopcontact.

2. MEMOplanner starten

Houd de *aan/uit-knop* ingedrukt om te starten.

3. De instructies in de configuratiestappen volgen

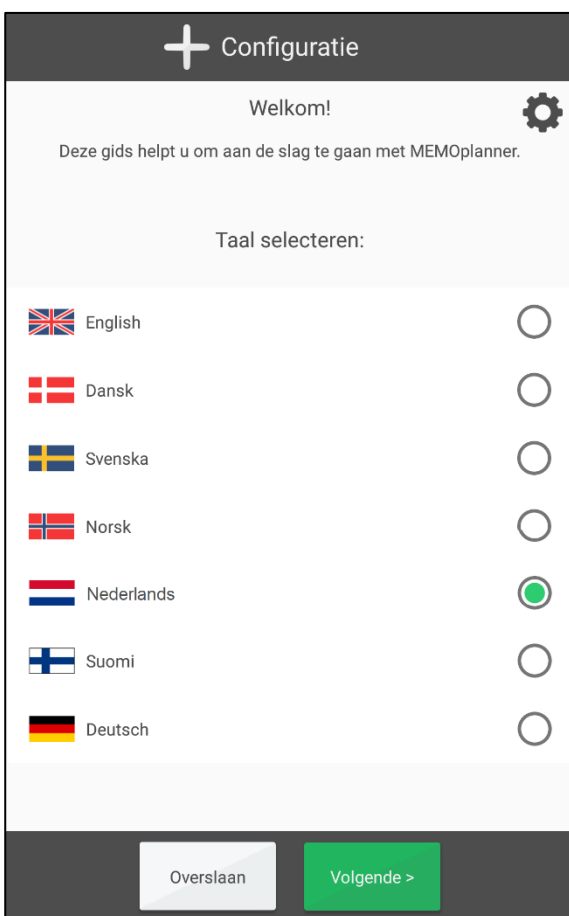


De configuratiegids helpt u bij het instellen van MEMOplanner door u door de volgende stappen te leiden:

- Taal selecteren
- Verbinding maken met internet
- Updaten naar de laatste versie
- Tijd en datum instellen
- Spraakondersteuning selecteren

4. Inloggen met myAbilia-account

Om MEMOplanner te kunnen gebruiken, heeft u een myAbilia-account nodig.

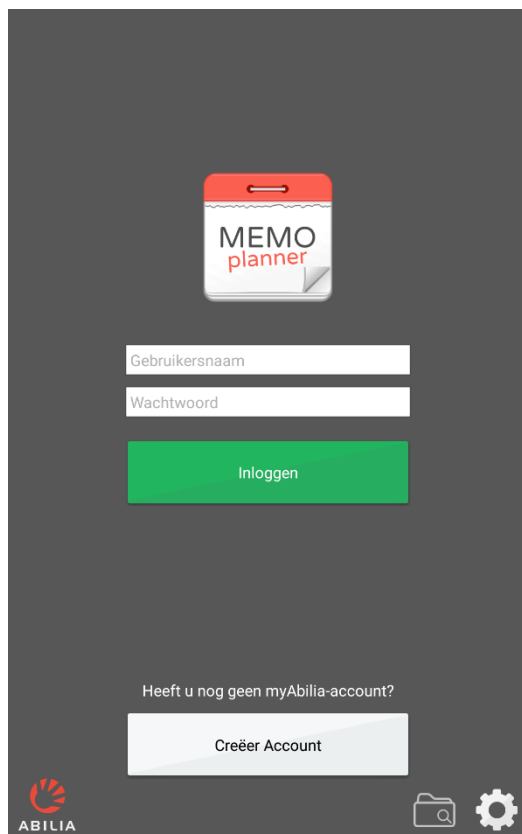gebruiksvoorwaarden' and 'Ik heb gelezen en akkoord gegaan: [privacybeleid](#)'. A green 'Creëer Account' button is at the bottom. A 'Terug naar Inloggen' button is in a dark bar at the very bottom." data-bbox="500 124 829 495"/>

Heeft u al een myAbilia-account?

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in en log in.

Wilt u een myAbilia-account creëren?

Druk op de knop **Creëer account** en volg de instructies op het scherm.

- Als u uw e-mailadres als gebruikersnaam invoert, kunt u uw wachtwoord gemakkelijk veranderen als u het vergeten bent.
- Als u uw telefoonnummer als gebruikersnaam invoert, kunnen wij van Abilia u helpen met het veranderen van uw wachtwoord als u het vergeten bent.

5. Uw accountgegevens onthouden

Schrijf uw accountgegevens hier op als geheugensteuntje.

Bewaar het briefje op een veilige plaats.

Mijn accountgegevens voor MEMOplanner en de webservice myAbilia

Gebruikersnaam: _____

Wachtwoord: _____

6. Starterset toevoegen

Bij een nieuw myAbilia-account hebt u de mogelijkheid om een starterset toe te voegen met een standaardactiviteiten, standaardtimers en checklists.



7. MEMOplanner is nu klaar voor gebruik!



8. Hulp op afstand bij de webservice myAbilia

Open een webbrowser op een computer, smartphone of tablet. Ga naar *myabilia.com* en log in met uw myAbilia-account. U kunt nu ondersteuningspersonen uitnodigen. Wanneer zij een eigen myAbilia-account hebben gecreëerd, kunnen ze u in MEMOplanner helpen met activiteiten, afbeeldingen, enz.



MEMOplanner en het internet

MEMOplanner heeft verbinding met internet en daarom kunt u:

- De webservice myAbilia gebruiken
- MEMOplanner als app op uw smartphone installeren
- Uw accountgegevens als veiligheidsmaatregel opslaan in de cloud
- MEMOplanner updaten naar de laatste softwareversie



Onthoud: als u MEMOplanner naar een andere locatie verplaatst, moet er een nieuwe internetverbinding tot stand worden gebracht.

Als er geen internetverbinding is, kan MEMOplanner toch worden gebruikt.

Wij helpen u!

Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon om naar de meest recente handleidingen te zoeken.

